

# Nasopharyngeales Mikrobiom

## Inhalt Testkit:

- 1 10 ml Röhrchen vorgefüllt mit 2 ml Konservierungsmittel\*
- 1 steriler Tupfer
- Informationsblatt und Fragebogen


**Konservierungsmittel nicht in Augen oder auf Schleimhäute bringen!**

**\*Sicherheitsdatenblatt Konservierungsmittel**

## Sammelinstruktion


01

Nasopharyngealen Abstrich für die Mikrobiologie abnehmen. Kräftig einige Sekunden drehend abstreichen um ausreichend DNA zu gewinnen.

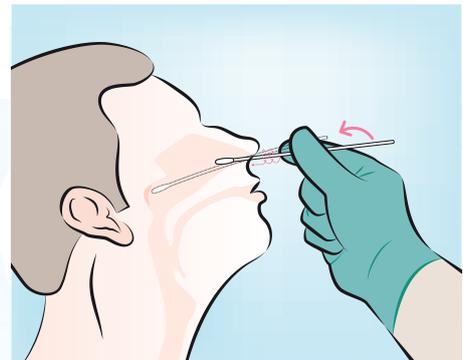

02

Nach dem Abstrich den Tupfer vollständig in die Konservierungsflüssigkeit eintauchen, an der Knickstelle abbrechen, das Röhrchen fest verschrauben.

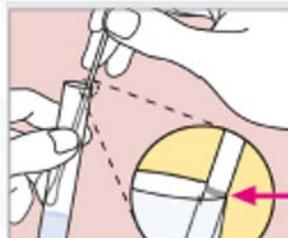

03

Das Schraubröhrchen in die Versandröhre mit Saugfilter stecken und mit dem Schraubverschluss verschließen. In die Versandbox zurückgeben.



04

**Fragebogen vollständig ausfüllen** und mit der befüllten Abnahmeschachtel an das Labor (Adresse oben) einsenden.

**Material ist nicht mehr infektiös (UN3373, Biological Substance Category B)**  
**Lagerung und Transport erfolgt bei Raumtemperatur (mindestens 6 Wochen haltbar)**